


# Protocole de forage - **LIKE A**

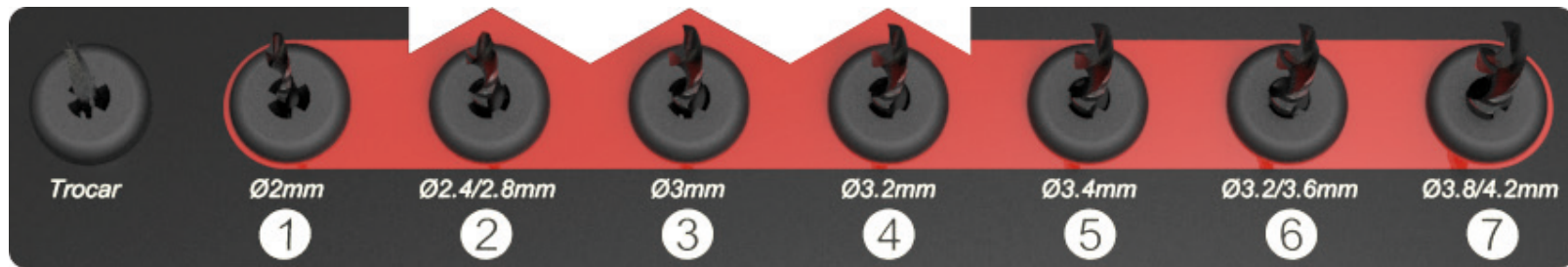

Au besoin, si l'os est très dur, possibilité d'ajouter les étapes en rouge ( - )

Diamètre implant	Séquence de base	Densité osseuse	Séquence de forage
<b>NP</b> Ø 3,5 mm → Foret Trocar → ①		Soft D4-D3	--
		Medium D3-D2	+ ② ③
		Hard D2-D1	+ ② ③ ④
<b>RP</b> Ø 4.3 mm → Foret Trocar → ① ② ③ ④		Soft D4-D3	--
		Medium D3-D2	+ ⑤ ⑥
		Hard D2-D1	+ ⑥ ⑦
<b>WP</b> Ø 5 mm → Foret Trocar → ① ② ③ ④ ⑤		Soft D4-D3	⑥
		Medium D3-D2	+ ⑥ ⑦
		Hard D2-D1	+ ⑥ ⑦